

Рекомендация по применению

Гель с содержанием пероксида карбамида для химического расширения корневых каналов зубов "Дилатон-гель+" по ТУ 9391-038-10614163-2001

РУ № ФСР 2011/10713 от 07.05.2018 г.

Назначение

"Дилатон-гель+" является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устья каналов, обладает антисептическим действием.

Основные свойства и технические характеристики

«Дилатон-гель+» представляет собой гель белого цвета, содержит в своём составе 19% трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), пероксид карбамида, водорастворимый гелеобразователь. Основным действующим веществом является трилон Б, который обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Содержание пероксида карбамида способствует пенообразованию в канале, что облегчает удаление дентинных опилок. Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала.

Противопоказания к применению

Противопоказаний не выявлено.

Способ применения

Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-гель+» в корневой канал. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала при помощи эндодонтических инструментов. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения, корневой канал промыть водой.

Форма выпуска

Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт; Рекомендация по применению — 1 шт
Насадка на шприц (игла) — 5 шт.

Условия хранения и транспортирования

Хранить при температуре от + 4°C до + 25°C. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель+» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов

Отходы после использования «Дилатон-гель+» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2 года

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru