

Рекомендация по применению

Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидрооксида кальция «Супрадент» в шприц-тюбике по ТУ 9391-009-10614163-99

РУ № ФС Р 2010/09821 от 31.12.2010г.

Назначение

Стоматологический материал «Супрадент» используется в качестве подкладочного материала под постоянные пломбы при лечении глубокого кариеса (прямое и непрямое покрытие пульпы).

Основные свойства и технические характеристики

«Супрадент» представляет собой готовую к применению рентгеноконтрастную пасту на основе гидрооксида кальция. Материал способствует образованию вторичного дентина, являющегося биологической защитой живой пульпы зуба. «Супрадент» обладает антисептическим действием благодаря высокому рН среды и обеспечивает интенсивное антимикробное действие. В состав пасты входит гидроокись кальция, рентгеноконтрастный наполнитель, пастообразователь на водной основе и модифицирующие добавки.

Способ применения

Нанести материал на дно полости, слой просушить сжатым воздухом. Материал затвердевает в течение 30 секунд. Перед восстановлением анатомической формы зуба реставрационным материалом полость с гидроокисью кальция дополнительно выстилается стеклоиономерным цементом.

Форма выпуска

Паста (шприц)- 7 г.; Инструкция по применению — 1 шт.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 5°С до +25°С в плотно закрытом шприце, в сухих вентилируемых помещениях. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

Утилизация отходов:

Отходы при использовании «Супрадент» в виде остатков пасты, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Срок годности: 1 года.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru