

Инструкция по применению

Жидкость стоматологическая для антисептической обработки и частичного расширения корневых каналов зубов на основе гипохлорита натрия 3% «Биосепт» по ТУ 9391-047-10614163-2011

ПУ № ФСР 2011/11106 от 16.06.2011.

Назначение

Для антисептической обработки каналов зубов и частичного их расширения перед пломбированием

Способ применения

Для промывания канала набрать в шприц необходимое количество раствора, провести орошение с помощью эндодонтической иглы. При работе в каналах с несформированной верхушкой корня или ее резорбцией, при переломах корня, в случаях, когда необходимо мягкое воздействие на живые ткани использовать раствор Биосепта с концентрацией от 0,5 до 1% подогретый до 37 °С

Меры предосторожности

Раствор едок - не применять в ранах, инициированных областях мягких тканей при недоразвитой верхушке корня зуба.

Условия хранения

Хранить при температуре от +4°С до +25°С в темном месте.

Утилизация отходов:

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А

Срок годности: 2 года.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru