

Рекомендация по применению

Гель для травления эмали и дентина «Целит» «Продент 36» по ТУ 9391-017-10614163-2011

ПУ № ФСР 2011/12587 от 05.03.2018г.

Назначение

Гель для травления является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, предназначен для протравливания эмали и дентина в процессе подготовки зуба к пломбированию.

Состав и основные свойства

В состав геля входит ортофосфорная кислота $36 \pm 2\%$, гелеобразователь, краситель. Гель обладает оптимальной консистенцией и после нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, полностью смывается водой. Обработка препарируемой поверхности гелем позволяет значительно увеличить адгезию пломбировочного материала к твёрдым тканям зуба.

Способ применения

Снять колпачок со шприца, насадить на его место насадку на шприц (иглу). Нанести необходимое количество геля на сухую подготовленную поверхность зуба: сначала на эмаль, через 15-20 секунд на дентин и выдержать ещё 15 секунд. По истечении времени обработки, гель смыть водой и просушить поверхность зуба сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность должна иметь матовый меловой оттенок. При повышенной резистентности эмали травление необходимо повторить (не более 30 секунд). ВНИМАНИЕ: Гель содержит ортофосфорную кислоту, избегать попадания геля на слизистую поверхность. В случае попадания геля на слизистую, необходимо обильно промыть водой.

Форма выпуска

Шприц с гелем объёмом 5 мл (массой 7,5 г) закрытый колпачком; Насадка на шприц (игла) в полиэтиленовом пакете - 5 шт.; Рекомендация по применению - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования

Хранить при температуре от +4 °С до +25° С. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей. Гель для травления в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования по группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие геля для травления требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Изделие однократного применения, не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов:

Отходы после использования «Гель для травления эмали и дентина «Целит» «Продент 36» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2,5 года

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru